

Información importante

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el autoinyector del estudio.
- Si tiene síntomas de un infarto de miocardio:
 - **inyéctese el medicamento del estudio;**
 - **llame al 112 o pida atención médica de urgencia de inmediato**, incluso si los síntomas desaparecen; y
 - **no se inyecte una segunda dosis.**
- **No retire** la tapa hasta justo antes de administrar la inyección.
- **Después de retirar la tapa, nunca vuelva a colocarla ni a almacenar** su autoinyector del estudio **para usarlo más adelante**, para evitar la contaminación.
- **Deseche** la tapa de inmediato después de la inyección, ya que podría ser un riesgo de asfixia para los niños.
- **No reutilice** el autoinyector del estudio.
- **No se inyecte a través de la ropa.**
- **No toque** el protector de la aguja de color blanco para evitar lesiones.
- **Revise** el autoinyector del estudio a menudo para asegurarse de que no esté dañado.

No use el autoinyector del estudio si:

- la fecha de caducidad ya ha pasado;
- el sello de seguridad rojo está roto;
- observa cualquier daño o filtración;
- el medicamento en la ventana de inspección no es de color transparente a amarillo claro o si contiene partículas;
- ha sido sumergido en el agua;
- está congelado o estuvo congelado y se ha descongelado; o
- ha estado expuesto a un calor extremo.

Almacenamiento del autoinyector del estudio


- Almacene el autoinyector del estudio a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C hasta su fecha de caducidad.
- **No** congele el autoinyector del estudio.
- **No** exponga el autoinyector del estudio a un calor extremo. Por ejemplo, no lo almacene en la guantera de su vehículo.
- Mantenga el autoinyector del estudio fuera del alcance de los niños.

Modo de empleo

Estudio ID-076A301/SOS-AMI

Selatogrel 16 mg o placebo en una solución de 0,5 ml.
Autoinyector de dosis única para uso subcutáneo.


A continuación se muestran las partes del autoinyector del estudio.

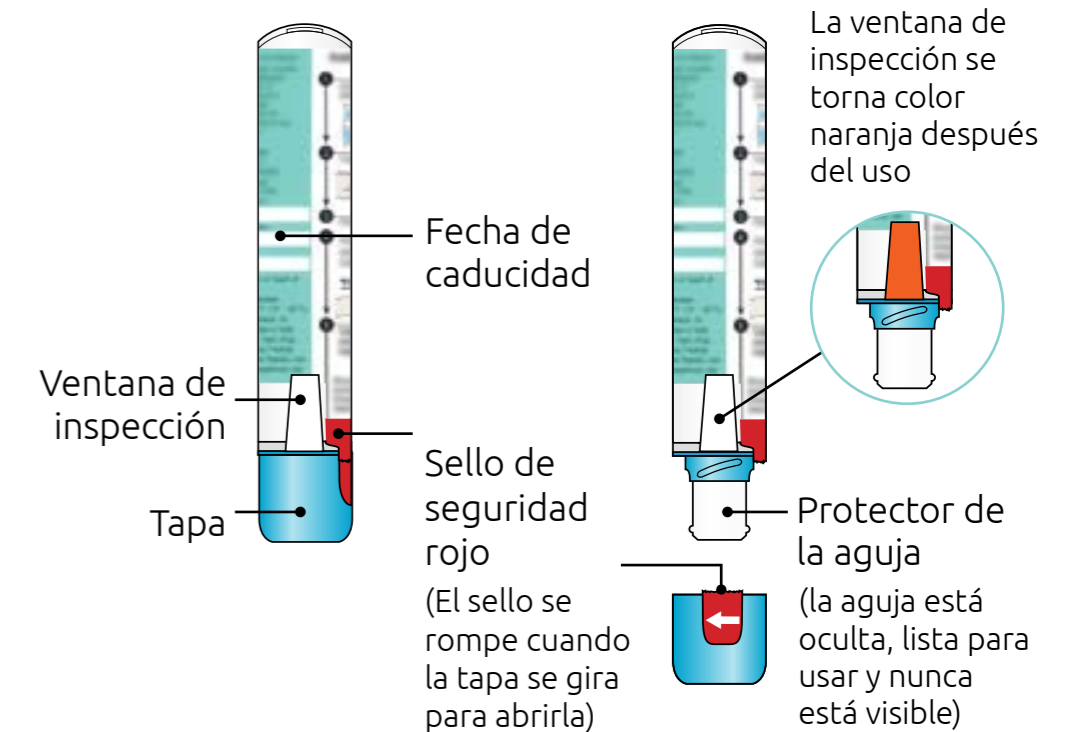

Cómo usar el autoinyector del estudio


Paso 1: elija el lugar de inyección

- **Estómago (abdomen) o muslo**
- **No** se inyecte en lugares donde la piel esté sensible, lesionada, con moretones o cicatrices, ni en áreas con venas visibles.
- **No** se inyecte a través de la ropa.

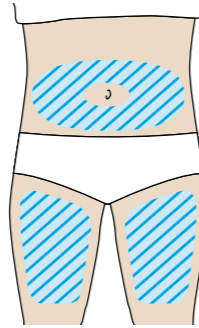


Paso 1: elija el lugar de inyección

- Gire la tapa en sentido inverso a las agujas del reloj para retirarla.
- **No** retire la tapa hasta que esté listo para inyectarse.
- **No** toque el protector de la aguja con sus dedos. La aguja se encuentra dentro del protector de la aguja.
- **No** vuelva a colocar la tapa en el autoinyector del estudio después de haberla retirado.

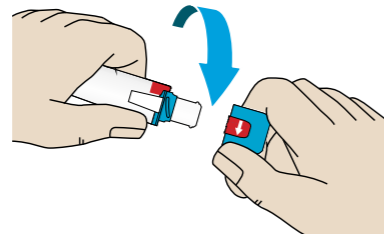


Paso 3: pellizque la piel y apoye el autoinyector del estudio

- Pellizque la piel en el lugar de la inyección, creando un área de aproximadamente 5 cm de ancho.
- Coloque el autoinyector del estudio a 90° (perpendicular) sobre la piel pellizcada.

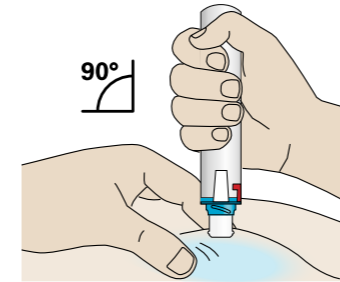

Paso 4: presione hacia abajo firmemente y mantenga la presión por 3 segundos

- Presione hacia abajo firmemente el autoinyector del estudio hasta que sienta un clic.
- Mantenga la **presión por 3 segundos** mientras sostiene la piel pellizcada.

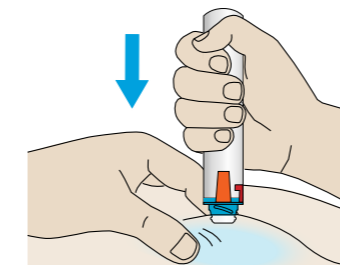

La ventana de inspección se torna color naranja una vez finalizada la inyección.

Paso 5: llame al 112 o pida atención médica de urgencia de inmediato

- Informe al 112 o al personal de urgencias sobre sus síntomas y sobre el autoinyector del estudio.

112

Muestre el autoinyector del estudio usado al personal de urgencias

No deseche (tire a la basura) el autoinyector del estudio