

## Важная информация

- Перед использованием исследуемого автоинъектора внимательно прочтите все инструкции.
- Если у вас появились симптомы инфаркта миокарда,
  - **сделайте инъекцию исследуемого препарата;**
  - **немедленно позвоните по телефону 101 или обратитесь за экстренной медицинской помощью,** даже если симптомы прошли; и
  - **ни в коем случае не вводите вторую дозу.**
- **Не снимайте** колпачок, пока не будете готовы сделать инъекцию.
- **Сняв колпачок, никогда не надевайте его обратно и не храните** исследуемый автоинъектор со снятым колпачком **для последующего использования.** Это может привести к его загрязнению.
- **Выбросьте** колпачок сразу же после инъекции, чтобы он не попал в руки детей, которые могут им подавиться.
- **Не используйте** исследуемый автоинъектор **повторно.**
- **Не делайте инъекцию через одежду.**
- **Не прикасайтесь** к белому защитному кожуху иглы во избежание травмирования.
- Регулярно **проверяйте** исследуемый автоинъектор, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

## Не используйте исследуемый автоинъектор, если

- истек срок годности;
- нарушена красная защитная пломба;
- имеется повреждение или протечка;
- лекарственный препарат в смотровом окошке изменил цвет (не бесцветный или светло-желтый) или содержит видимые частицы;
- исследуемый автоинъектор погружался в воду;
- исследуемый автоинъектор заморожен или был заморожен, а потом оттаял;
- исследуемый автоинъектор подвергался чрезмерному нагреву.

## Хранение исследуемого автоинъектора


- Храните исследуемый автоинъектор при температуре от 15 до 25°C до истечения срока годности.
- **Не замораживайте** исследуемый автоинъектор.
- **Не подвергайте** исследуемый автоинъектор чрезмерному нагреву. Например, не храните его в бардачке автомобиля.
- Храните исследуемый автоинъектор в недоступном для детей месте.

## Инструкция по применению

### Исследование ID-076A301 / SOS-AMI

Селатогрел 16 мг или плацебо в 0,5 мл раствора. Одноразовый исследуемый автоинъектор для подкожного введения.


### Ниже показаны компоненты исследуемого автоинъектора

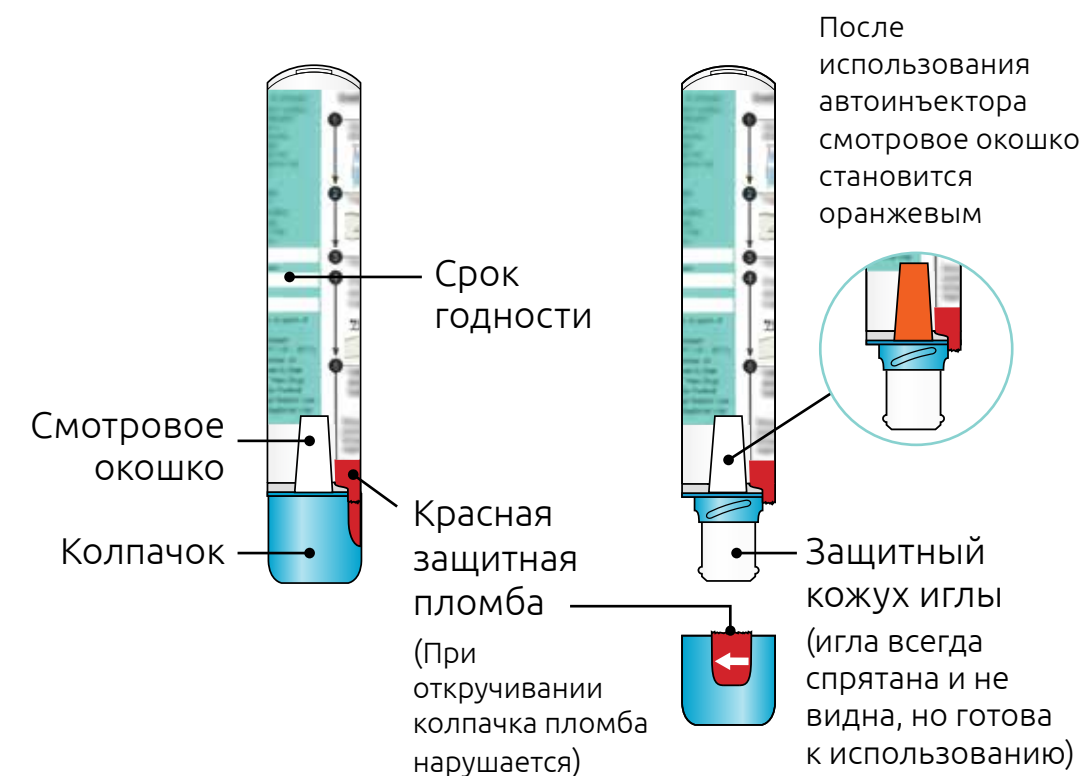

## Как использовать исследуемый автоинъектор


### Шаг 1: выберите место для инъекции

- **Инъекция выполняется в живот или бедро.**
- **Не делайте** инъекцию в места с болезненной или поврежденной кожей, с кровоподтеками или шрамами, а также вблизи видимых вен.
- **Не делайте** инъекцию через одежду.

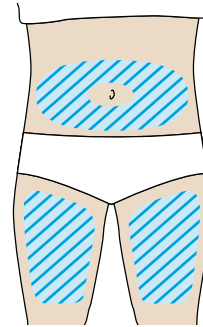


### Шаг 2: открутите колпачок

- Чтобы снять колпачок, откручивайте его против часовой стрелки.
- **Не снимайте** колпачок до тех пор, пока не будете готовы сделать инъекцию.
- **Не касайтесь** защитного кожуха иглы пальцами. Под защитным кожухом находится игла.
- **Не надевайте** колпачок обратно после того, как сняли его с исследуемого автоинъектора.

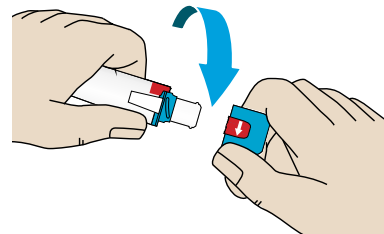


### Шаг 3: сделайте кожную складку и поднесите исследуемый автоинъектор

- Соберите кожу в месте инъекции в складку шириной примерно 5 см.
- Приставьте исследуемый автоинъектор к собранной в складку коже, расположив его под углом 90 градусов (перпендикулярно).

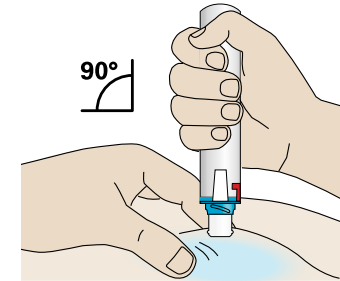

### Шаг 4: плотно прижмите исследуемый автоинъектор к коже на 3 секунды

- Плотно прижимайте исследуемый автоинъектор к коже, пока не услышите щелчок.
- Продолжайте **удерживать его в этом положении в течение 3 секунд**, не отпуская кожную складку.

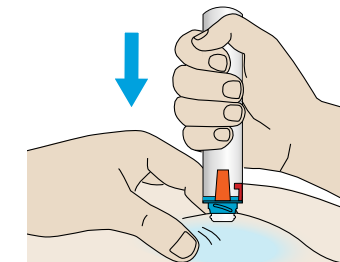

После завершения инъекции смотровое окошко станет оранжевым.

### Шаг 5: немедленно позвоните по телефону 101 или обратитесь за экстренной медицинской помощью

- Сообщите по телефону 101 или работнику службы экстренной медицинской помощи о своих симптомах, а также о предоставленном вам исследуемом автоинъекторе.

101

**Покажите использованный  
исследуемый автоинъектор  
работнику службы экстренной  
медицинской помощи**

**Не выбрасывайте и не  
утилизируйте использованный  
исследуемый автоинъектор**